Quick-Guide – MELAtrace Lizenzierung

Unser Quick-Guide zum Freischalten Ihres MELAtrace-Zeitguthabens führt Sie Schritt für Schritt durch den Ablauf des Lizenzierungsprozesses! Damit Sie im Handumdrehen mit MELAtrace von einer lückenlosen, schnellen und papierlosen Dokumentation profitieren können.

1. MELAtrace Software kostenlos downloaden

Laden Sie die aktuellste Software-Version der MELAtrace kostenfrei und unkompliziert in unserem Downloadcenter oder unter: **www.melag.com/de/produkte/dokumentation/melatrace** herunter und speichern Sie diese auf Ihrem Rechner. Nach erfolgreicher Installation, öffnen Sie die Software.



2. MELAG-Account erstellen

Um sich erstmalig in Ihrer MELAtrace anmelden zu können, müssen Sie sich einen MELAG-Account erstellen. Sie können sich unter folgendem Link registrieren: **melatrace.melag.com** oder durch Klicken auf "Jetzt Account erstellen" in der MELAtrace. Nach erfolgreicher Registrierung öffnen Sie erneut Ihre MELAtrace-Software und melden sich mit mit Ihren Account-Daten an.



3. Lizenzcode eingeben

Im nächsten Bildschirm schalten Sie Ihr persönliches Zeitguthaben zur Nutzung der MELAtrace frei. Geben Sie dafür in den dafür vorgesehenen Feldern Ihren persönlichen 24-stelligen Lizenzcode ein, den Sie per E-Mail erhalten haben. Um eine 3-monatige Testlizenz zu erhalten und MELAtrace kostenlos zu nutzen, wählen Sie die genannte Option aus und bestätigen Sie mit "OK".



4. MELAtrace starten

Well done! Sie haben Ihr Zeitguthaben erfolgreich freigeschaltet und können die MELAtrace jetzt für die digitale Dokumentation und Freigabe Ihrer Instrumenten-Aufbereitung nutzen!





Weitere Informationen finden Sie unter www.**melag**.com

